

# MEDI SHINE



REALYS  
ESTHETIC  
matériels & dispositifs médicaux

[WWW.REALYS-ESTHETIC.COM](http://WWW.REALYS-ESTHETIC.COM)

CE

# Qu'est ce que MEDI SHINE ?

---

MEDI SHINE est un dispositif électronique d'assistance à l'injection de produit de remplissage composé d'une pièce à main permettant la fixation d'une seringue de 1, 2 ou 3 cm<sup>3</sup> et d'une pédale Bluetooth.

**C'est le premier système d'injection assisté sans fil (pédale Bluetooth) au monde.**

**MEDI SHINE est léger et ergonomique.**

Sa technologie SDI :

- Lui assure une **fiabilité optimale**
- Permet l'**injection d'une quantité infime de produit injectable** (minimum 0.001 cm<sup>3</sup>) de façon régulière quelque soit le produit.

**Sa pédale Bluetooth permet une maniabilité optimale**

(pas de mouvement de la main lors de la mise en marche).

**C'est un appareil polyvalent qui permet d'utiliser tous les produits injectables :**

- Acide hyaluronique
- Produit de mésothérapie
- PRP
- Injection de cellules souches
- ou autre

## Pourquoi choisir MEDISHINE ?

---

1. Son poids
2. Sa pédale Bluetooth
3. Sa Maniabilité
4. Sa Précision



## Les autres points positifs

---

- La technique SDI autorise un cycle de rotation de 68 rotations/min. Cela lui permet également d'injecter une quantité très minime de produit de façon reproductible (jusqu'à 0.001 cm<sup>3</sup> par dose)
- Son moteur très puissant lui permet d'injecter des produits de viscosité importante ou composés de grosses particules par l'intermédiaire d'une aiguille très fine qui permet une injection précise et peu douloureuse
- Lors de l'arrêt de l'injection, MEDI SHINE fait tourner le moteur dans le sens inverse pendant quelques dixièmes de seconde ce qui coupe complètement l'inertie de l'injection de produit.
- La pression dans la seringue s'arrête immédiatement et aucun produit ne sera perdu ou injecté de façon malencontreuse après l'arrêt du moteur (à condition d'avoir purger la seringue)
- Le système utilise la seringue avec son embout d'origine, ce qui laisse la liberté au médecin d'utiliser n'importe quelle aiguille ou canule adaptable sur la seringue.

## Le MEDI SHINE en vidéo

---





[www.realys-esthetic.com](http://www.realys-esthetic.com)



04.89.02.02.21



24 Avenue de Nice, 06600 ANTIBES



[contact@realys-esthetic.com](mailto:contact@realys-esthetic.com)

