



REALYS
matériels & dispositifs médicaux
ESTHETIC

MAYFILL_{II}


Filler à base d'Acide Hyaluronique
biphasique avec lidocaïne





LIGHT



DEEP

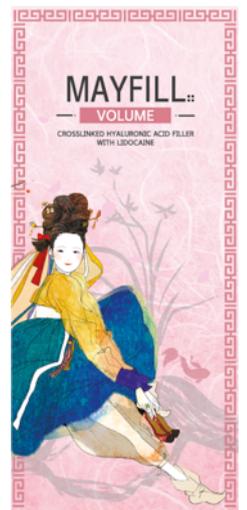

VOLUME

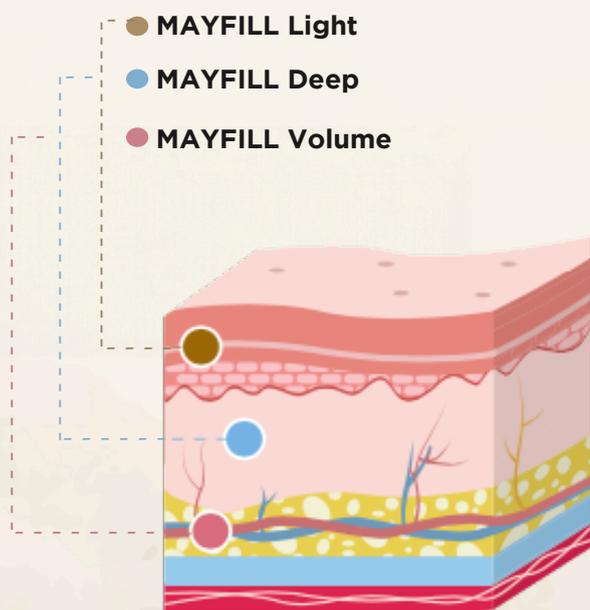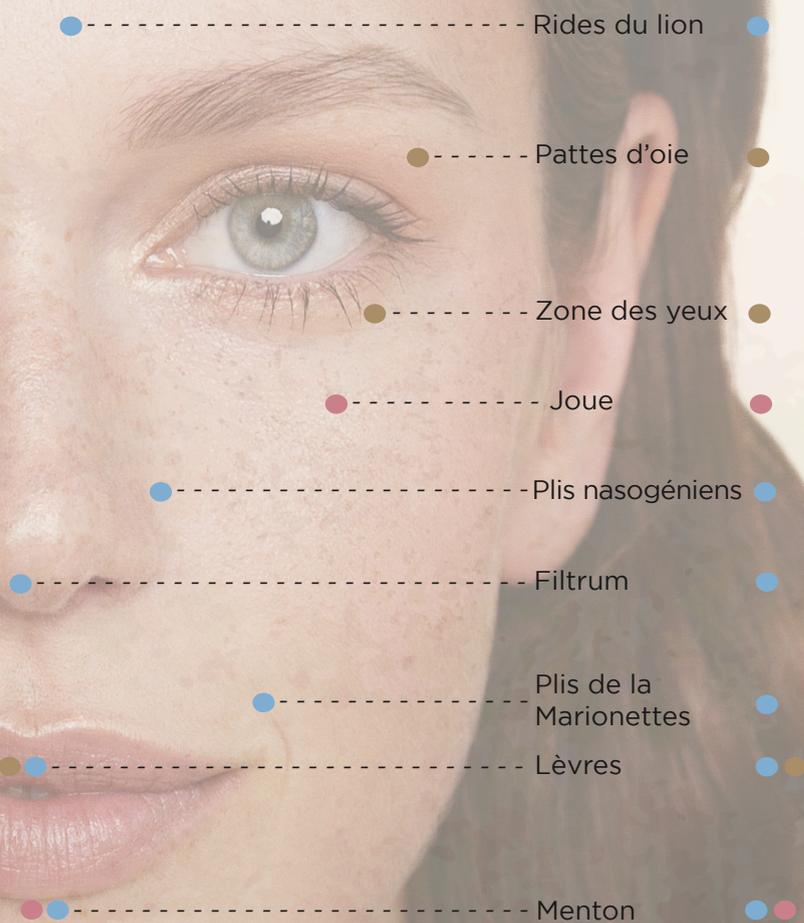

Multiphasique
Acide Hyaluronique : 20mg/ml
Aiguille : 27G 1/2 - 30G 1/2
Objectif : Correction des rides fines
Profondeur d'injection : Derme moyen




Multiphasique
Acide Hyaluronique : 20mg/ml
Aiguille : 27G 1/2 (2ea)
Objectif : Correction des rides profondes
Profondeur d'injection : Derme profond




Multiphasique
Acide Hyaluronique : 20mg/ml
Aiguille : 25G 1/2 + 27G 1/2
Objectif : Volumisation et remodelage
Profondeur d'injection : Hypoderme

Moins d'œdème

Grâce à une hydratation optimisée, l'injection de Mayfill minimise le risque d'œdème car Mayfill est à pression osmotique identique à celle que l'on retrouve dans les tissus cutanés

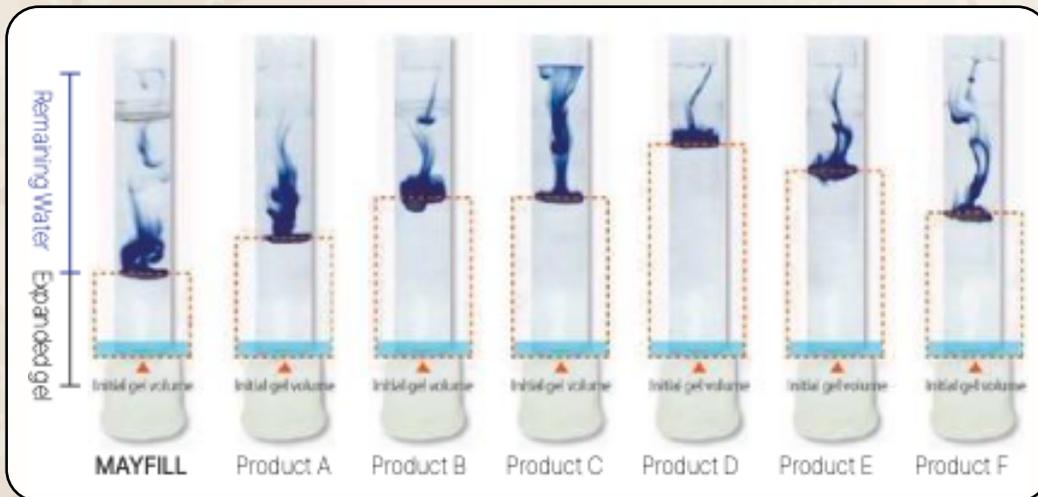

Plus de sécurité

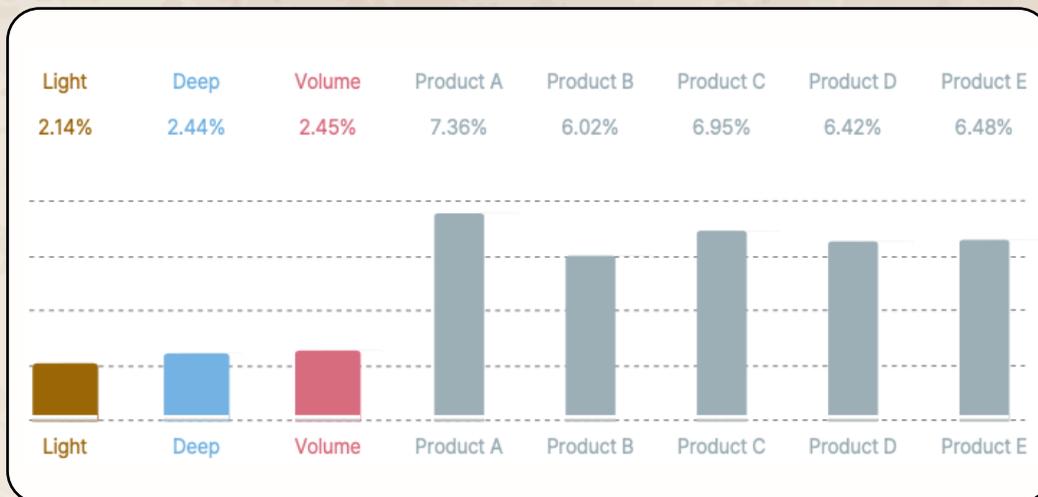

Le BDDE (1,4-butanediol diglycidyl éther), est l'agent de réticulation habituel de l'Acide Hyaluronique. Il est la cause la plus probable des réactions allergiques.

La mesure du MOD (degré de modification de l'acide Hyaluronique) peut être considérée comme une mesure indirecte de la réaction inflammatoire. Mayfill possède un MOD très bas

Ref. Analyse MoD des produits de comblement dermique à l'AH (acide hyaluronique) (6 types) Université Chung-Ang. Kim Beom-jun Propriétés rhéologiques et physicochimiques utilisées pour différencier les produits de comblement injectables à base d'acide hyaluronique. Steven Fagien, M.D.

Indications multiples

Mayfill est conçu pour être adaptable à chaque zone de traitement du visage.



	Elasticité (G')	Viscosité (G'')	Zone de traitement typiques
LIGHT	239 Pa	67 Pa	Zones devant exprimer des surfaces lisses avec une viscosité et une élasticité modérées (milieu du front, poches sous les yeux, lèvres, graisse sous les yeux)
DEEP	416 Pa	83 Pa	Zones nécessitant du volume et de la résilience grâce à une viscosité moyenne et une élasticité élevées (pommettes, sillons nasogéniens, etc.)
VOLUME	572 Pa	144 Pa	Zones où la viscosité et l'élasticité sont très élevées et où le volume est donc particulièrement nécessaire (nez, front, menton)


Le MAYFILL a des valeurs d'élasticité élevée et de viscosité optimale ce qui lui confère une durabilité maximale avec une facilité et une précision d'injection optimisée.

Elasticité (G')	416 Pa	A=163 Pa	B=206 Pa	C=90 Pa
Viscosité (G'')	83 Pa	A=35 Pa	B=36 Pa	C=33 Pa

Ref. *Dermatol Surg* 2015;41:120-s126 Hema Sundaram et al. *Plast.Reconstr.Surg.*(2013)132.5s
Données de comparaison basées sur MayFill

Dégradation rapide par Hyaluronidase injectable


Les Fillers AH doivent être éliminés facilement en cas d'hyper-corrrection. C'est une des raisons pour laquelle l'injection d'acide hyaluronique est sûre.

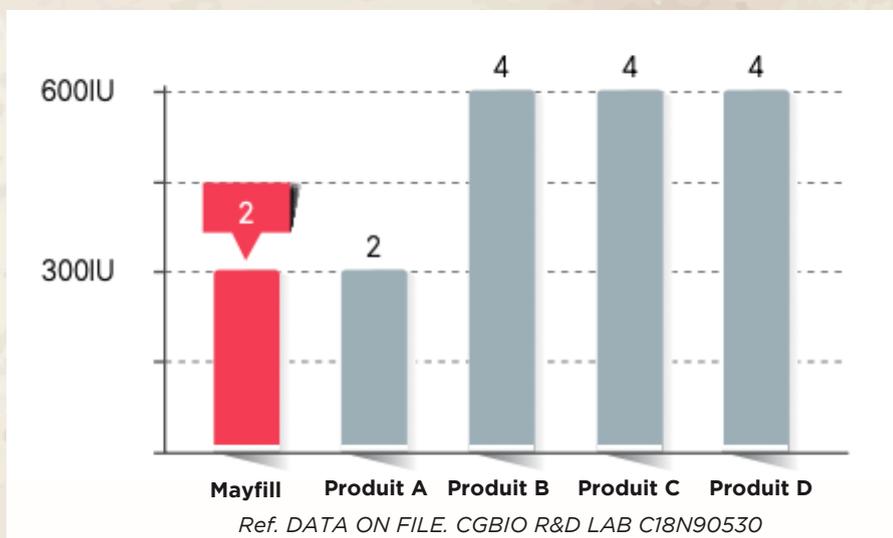

**Mayfill peu-être éliminé
avec 300 UI de Hyaluronidase
en 2 heures**



Procédure confortable et peu douloureuse

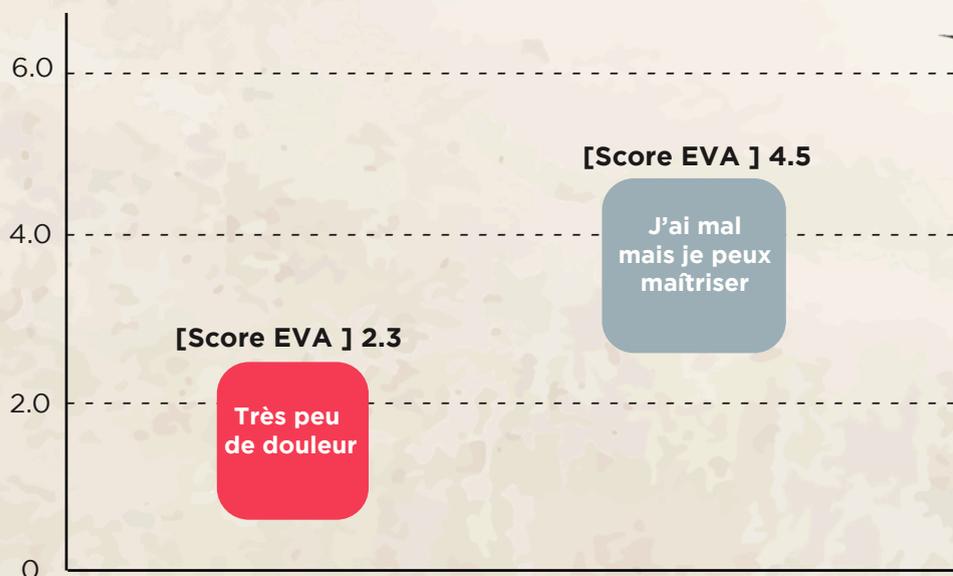

Réf. Rapport clinique pour approbation par le ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments

* MAYFILL peut-être injecté immédiatement sans anesthésie topique.

* La lidocaïne est mélangée uniformément selon la méthode R / Square method afin de minimiser la douleur pendant la procédure. Le score EVA (échelle visuelle analogique) est une échelle utilisée pour déterminer l'intensité de la douleur ressentie par les individus, sur la base du score EVA.

Le score 3,0 est considéré comme «non douloureux». Ce score est largement utilisé pour mesurer la douleur causée par les dispositifs médicaux et les médicaments délivrés sur ordonnance.

Sécurité du processus de fabrication

Le processus et l'environnement de fabrication sont importants pour obtenir des fillers AH de qualité. MAYFILL est fabriqué dans une installation de pointe de niveau cGMP dans des conditions de stricte asepticité.



ISO 13485 / GMP, installation GMP certifiée par le ministère de l'alimentation et de la sécurité des médicaments.

MAYFILL_®

Filler à base d'Acide Hyaluronique
biphasique avec lidocaïne

Distributeur exclusif

REALYS
matériels & dispositifs médicaux
ESTHETIC



www.realys-esthetic.com



04.89.02.02.21



56 Bis Av. Isola Bella, 06400 Cannes



contact@realys-esthetic.com