


REALYS
matériels & dispositifs médicaux
ESTHETIC


STARDERM

Filler à base d'Acide Hyaluronique
Multiphasique avec lidocaïne

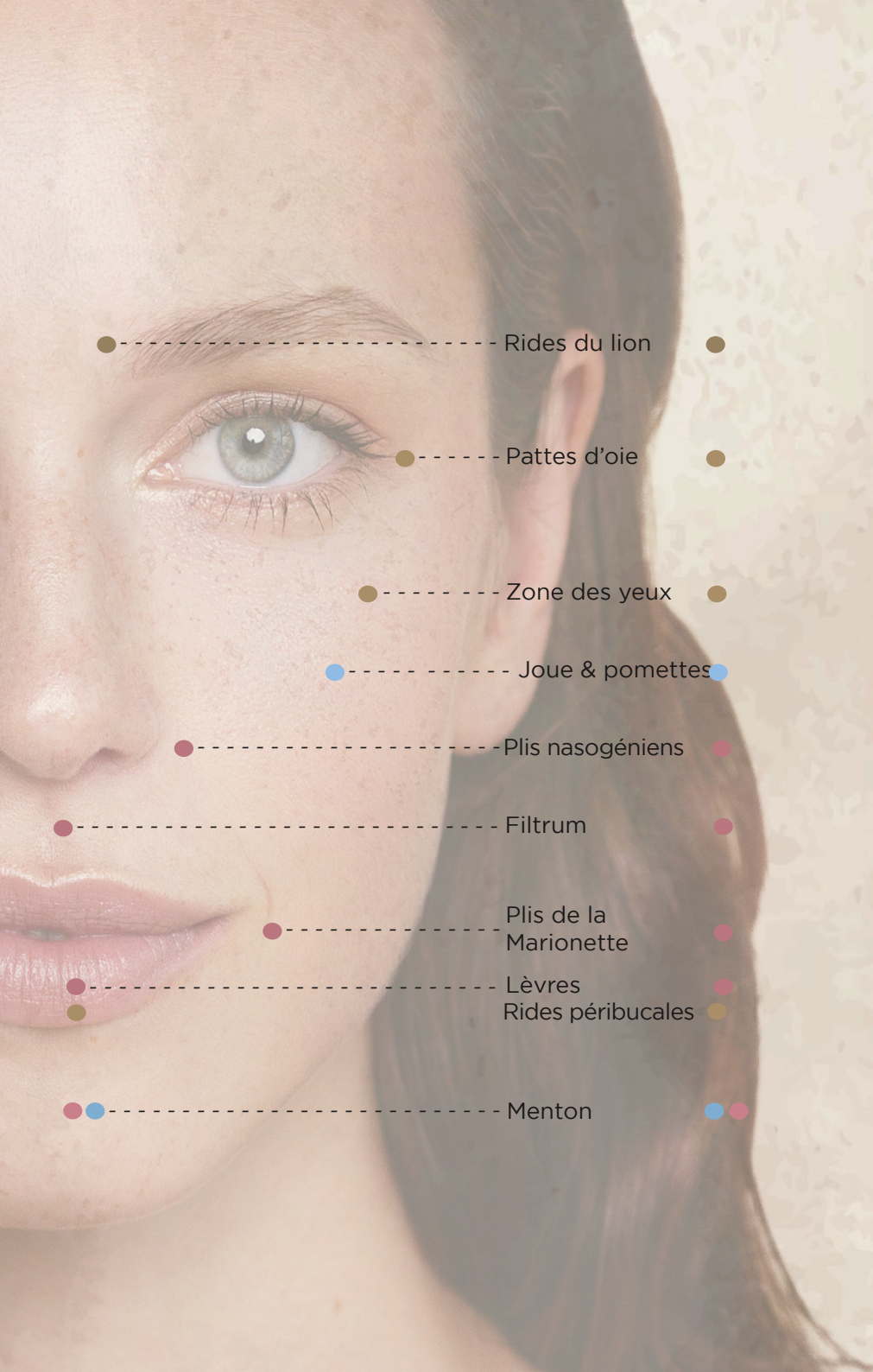

- Rides du lion ●
- Pattes d'oie ●
- Zone des yeux ●
- Joue & pommettes ●
- Plis nasogéniens ●
- Filtrum ●
- Plis de la Marionette ●
- Lèvres ●
- Rides péribucales ●
- Menton ● ●

- **Starderm PICO**
- **Starderm MEGA**
- **Starderm TERA**

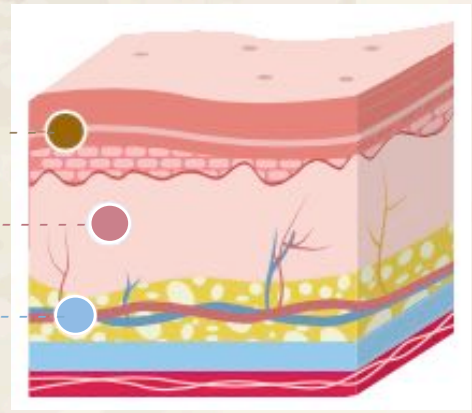




Multiphasique

Acide Hyaluronique : 20mg/ml

Aiguille : 27G 1/2' (2ea)

Objectif : Correction des rides fines

Profondeur d'injection : Derme moyen

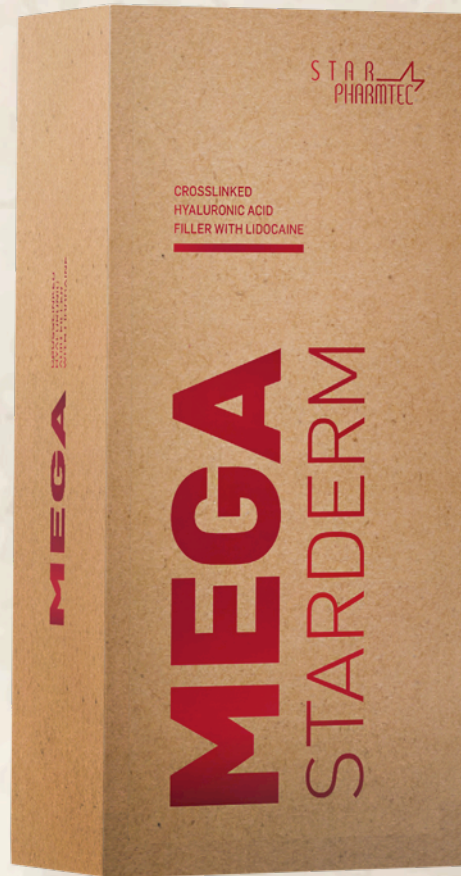

Multiphasique

Acide Hyaluronique : 20mg/ml

Aiguille : 27G 1/2' (2ea)

Objectif : Correction des rides profondes

Profondeur d'injection : Derme profond



Multiphasique

Acide Hyaluronique : 20mg/ml


Aiguille : 25G 1/2' (2ea)

Objectif : Volumisation et remodelage

Profondeur d'injection : Hypoderme

✓ MOINS D'ŒDÈME


Grâce à une hydratation optimisée, l'injection de Starderm minimise le risque d'œdème car Starderm est à pression osmotique identique à celle que l'on retrouve dans les tissus cutanés.

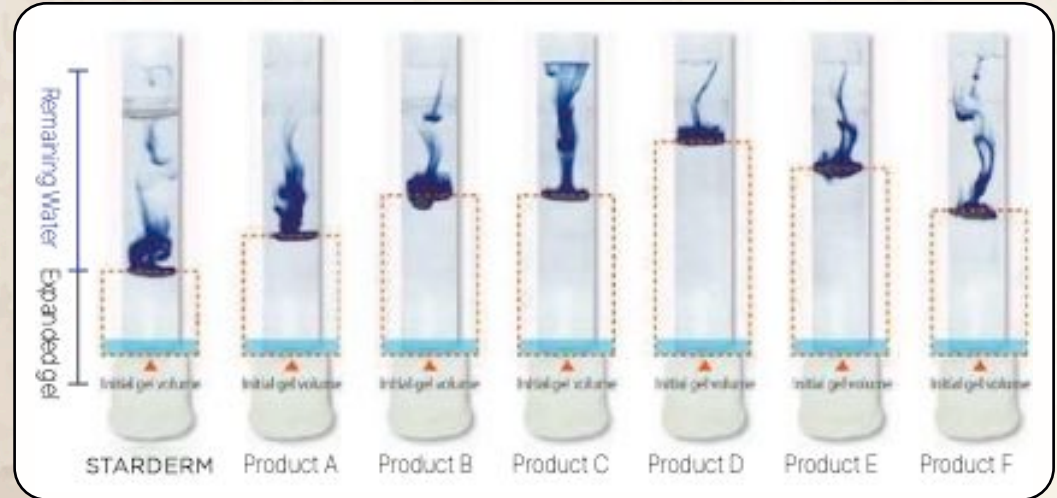

✓ PLUS DE SÉCURITÉ

Le BDDE (1,4-butanediol diglycidyl éther), est l'agent de réticulation habituel de l'Acide Hyaluronique. Il est la cause la plus probable des réactions allergiques.

La mesure du MOD (degré de modification de l'acide Hyaluronique) peut être considérée comme une mesure indirecte de la réaction inflammatoire. Starderm possède un MOD très bas.

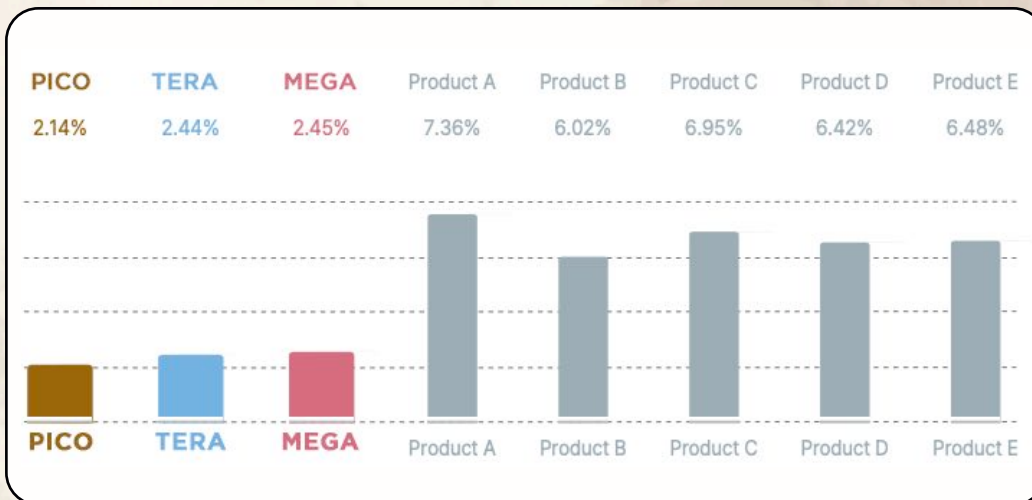

✓ INDICATIONS MULTIPLES

Starderm est conçu pour être adaptable à chaque zone de traitement du visage.

	Elasticité (G')	Viscosité (G'')	Zone de traitement typiques
PICO	239 Pa	67 Pa	Zones devant exprimer des surfaces lisses avec une viscosité et une élasticité modérées (milieu du front, poches sous les yeux, lèvres, graisse sous les yeux)
MEGA	416 Pa	83 Pa	Zones nécessitant du volume et de la résilience grâce à une viscosité moyenne et une élasticité élevées (pommettes, sillons nasogéniens, etc.)
TERA	572 Pa	144 Pa	Zones où la viscosité et l'élasticité sont très élevées et où le volume est donc particulièrement nécessaire (nez, front, menton)

Starderm a des valeurs d'élasticité élevée et de viscosité optimale ce qui lui confère une durabilité maximale avec une facilité et une précision d'injection optimisée.


Elasticité (G')	416 Pa	A=163 Pa	B=206 Pa	
Viscosité (G'')	83 Pa	A=35 Pa	B=36 Pa	

Ref. Dermatol Surg 2015;41:120-s126 Hema Sundaram et al. Plast.Reconstr.Surg.(2013)132:5s. Données de comparaison basées sur Starderm

✓ DÉGRADATION RAPIDE PAR HYALURONIDASE INJECTABLE

Les Fillers à base d'acide Hyaluronique peuvent être éliminés facilement en cas d'hyper-corrrection.

C'est une des raisons pour laquelle l'injection d'acide hyaluronique est sûre.

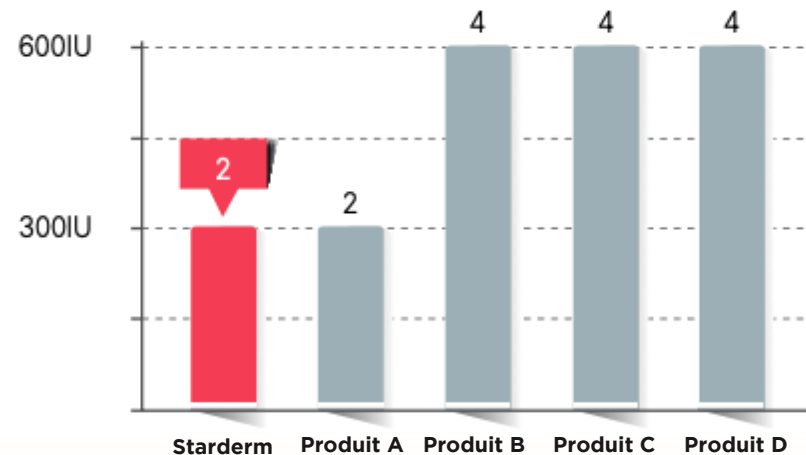

1 ml. de Starderm peut-être éliminé avec 300 UI de Hyaluronidase en 2 heures


Ref. DATA ON FILE. CGBIO R&D LAB C18N90530

✓ PROCÉDURE CONFORTABLE ET PEU DOULOUREUSE

* Starderm peut-être injecté immédiatement sans anesthésie topique.

* La lidocaïne est mélangée uniformément selon la méthode « R / Square method » afin de minimiser la douleur pendant la procédure. Le score EVA (échelle visuelle analogique) est une échelle utilisée pour déterminer l'intensité de la douleur ressentie par les individus, sur la base du score EVA.

Le score 3,0 est considéré comme « non douloureux ». Ce score est largement utilisé pour mesurer la douleur causée par les dispositifs médicaux et les médicaments délivrés sur ordonnance.

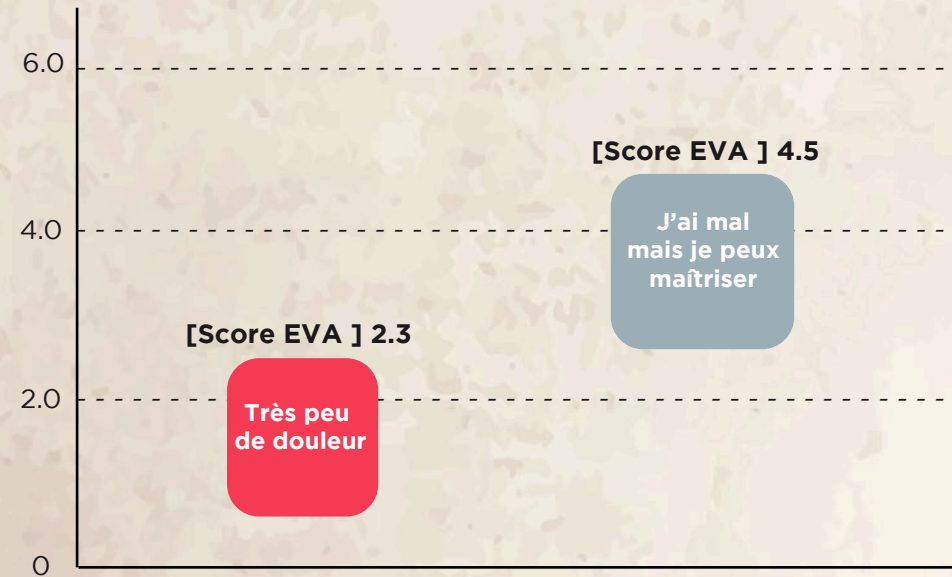

Réf. Rapport clinique pour approbation par le ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments

✓ SÉCURITÉ DU PROCESSUS DE FABRICATION

Le processus et l'environnement de fabrication sont importants pour obtenir des fillers AH de qualité. Starderm est fabriqué dans une installation de pointe de niveau cGMP dans des conditions de stricte asepticité.



*Correction des
Rides fines*



*Correction des
Rides profondes*



*Volumisation
& Remodelage*



Distributeur exclusif

REALYS
ESTHETIC

matériels & dispositifs médicaux

REALYS
ESTHETIC

matériels & dispositifs médicaux

Realys Esthetic

56 bis avenue Isola Bella,
06400 CANNES

Tél. 04.89.02.02.21

Mail. : contact@realys-esthetic.com



www.realys-esthetic.com